

# Kit de Coleta DIY

## Dados do Cliente

Nome: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Telefone: (     ) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

## Dados da Amostra

Nome: \_\_\_\_\_ Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Identificação (número ou anilha): \_\_\_\_\_

Espécie (nome científico ou comum): \_\_\_\_\_

Data da coleta: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Filiação

Pai: \_\_\_\_\_ Mãe: \_\_\_\_\_

Dobre na linha



Com uma fita adesiva (esparadrapo, durex, fita crepe) cole as penas nessa área conform indicado.

Não passe a fita sobre a área com sangue (BULBOS).

OU

Em um papel filtro de café, realize a coleta de sangue da ave. Evite o contato direto no local do sangue. Aguarde secar por aproximadamente 10 minutos e armazene-o junto dessas informações.



BULBO



Dobre na linha

## Informações importante

Preencha corretamente todos os campos deste kit. As informações contidas neste são necessárias para emissão do resultado. Informações incompletas poderão ocasionar atraso no envio dos resultados. Realize a coleta com bastante cuidado. Evite tocar diretamente na amostra, e após a coleta, envie o quanto antes ao laboratório. A coleta adequada (higiene e quantidade) e preservação do material estão diretamente relacionados com a qualidade do exame. Caso a amostra não esteja adequada para um resultado conclusivo, nova coleta gratuita poderá ser solicitada.

## Instruções para coleta de penas

Para penas com sangue é necessário que o material seja passado em papel filtro, preferencialmente, penas ainda em crescimento (possuem maior quantidade de sangue). Colete de 5 a 7 penas das asas ou do rabo. Caso prefira coletar penas da região peitoral ou das costas, colete aproximadamente 15 penas. Aguarde no mínimo 7 dias para coletar as penas de recém-nascidos. Após a coleta, cole-as com fita adesiva conforme instruções.